

# NEW PLASTIC

BIO DIET &  
CONTORNO  
ESTETICO

P M M A



## Composición

Polimetilmetacrilato, Hidroxietilcelulose, Metilparabeno, Propilparabeno y Agua para inyectables.

## Indicaciones

NEWPLASTIC® es indicado en la corrección volumétrica facial y corporal. También es indicado en la corrección de lipodistrofia por uso de antiretrovirales en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Compuesto de derivados sintéticos inabsorbibles, NEWPLASTIC® está designado para asegurar resultados clínicos de larga duración.



## Modo de Acción

NEWPLASTIC® es un implante inyectable biológicamente inerte que utiliza micro esferas de Polimetilmetacrilato con 40 micras de diámetro en promedio, en suspensión en un hidrogel, promoviendo corrección definitiva de depresiones en las localizaciones anatómicas en las que sea introducido. En virtud de su diámetro y de la ausencia de cualquier irregularidad en su superficie, las micro esferas no son fagocitadas, permaneciendo en el lugar donde fueron colocadas. En vista de su composición química, el vehículo es absorbido en hasta 24 horas, permaneciendo apenas las partículas de PMMA.

La corrección del defecto tratado con NEWPLASTIC® es obtenida por la suma de volumen del producto allí colocado, aumentado por la aportación de células y fibras que acuden al local. Esta aportación es progresiva, teniendo inicio cerca de nueve días después de la introducción del implante y prolongado por meses. Cualquier hipercorrección debe ser evitada. Es preferible una leve corrección de la depresión dérmica y en un intervalo mínimo de seis semanas, una nueva inyección/aplicación.

## Técnicas de Inyección



NEWPLASTIC® al 2% debe ser inyectado en la dermis profunda. Se utiliza para contorno de labios y arrugas finas.



NEWPLASTIC® al 10% debe ser inyectado en el tejido celular subcutáneo. Se utiliza en surcos nasogenianos, relleno de labios y dorso de las manos.



NEWPLASTIC® al 30% debe ser inyectado al nivel intramuscular o justa periosteal-pericondrial. Se utiliza para redefinir el borde mandibular, nariz, región malar, mentón, surco nasogeniano, aumento de glúteos, etc.

NEWPLASTIC® debe ser inyectado usando las técnicas puntiformes para la realización de pertuitos y a través de retro-inyección realizada lentamente dentro de los túneles creados por la micro-cánula. Es importante masajear con suavidad en la zona inmediatamente después de la aplicación para retirar lo que se acumule del producto, si hubiera o para distribuir armónicamente en el local implantado.

## Modo de Acción

Gel sintético para reconstrucción de deficiencia del tejido blando.

Jeringa con 1,0ml. Producto Estéril de Uso Único.

NEWPLASTIC® es un hidrogel que contiene 2, 10 o 30% de polimetilmetacrilato (PMMA).

Caja con 10 jeringas de 1,0 ml